

MONO LOURDES

# グリグリ温灸

管理医療機器：温灸器

モノルルド グリグリ温灸

品番 AX-HPL106



## 使用目的または効果

局所への加熱による灸の代用。一般家庭で使用する事。

- 疲労回復 ● 血行をよくする ● 筋肉の疲れをとる
- 筋肉のこりをほぐす ● 神経痛・筋肉痛の痛みの緩解
- 胃腸の働きを活発にする

## 目次

△ 安全上のご注意	1 ~ 4	🔧 故障かなと思ったら	9
🗂 梱包内容と各部の名称	5	🗑 廃棄について	10
👤 使いかた	6 ~ 8	⚙ 仕様	10
📖 お手入れ・保管について	8	♡ 保証とアフターサービス	裏表紙

このたびはAX-HPL106をお買上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。なお、この取扱説明書には保証書がついています。お読みになられたあとも、大切に保管してください。

※デザイン仕様を一部変更している場合があります。ご了承ください。

# ⚠ 安全上のご注意

ご使用になる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するために必ずお守りいただく事を説明しています。

## 警告表示の意味

表示内容を見逃して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で示しています。



### 警告

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



禁止を促す記号



### 注意

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。



強制を促す記号

## ⚠ 警告

### 症状について



**次の人は使用しないでください。**

- 自分で意思表示のできない人や身体の自由が利かない人及び幼児。
- 温度感覚喪失が認められる人
- 睡眠薬等を服用した人及びめいてい状態の人



**次のような人は必ず医師とご相談の上ご使用ください。**

事故や健康を害するおそれがあります。

- 悪性腫瘍のある人
- 心臓に障害のある人
- 妊娠初期の不安定期または出産直後の人
- 糖尿病などによる高度な末しょう(梢)循環障害からくる知覚障害のある人
- 安静を必要としている人や体調がすぐれない人
- せきついの骨折、ねんざ、肉離れなど、急性[とう(疼)痛性]疾患の人
- 体温38℃以上(有熱期)の人  
例：急性炎症症状[けん(倦)怠感、悪寒、血圧変動など]の強い時期、衰弱しているとき
- その他、医療機関で治療中の人
- 低温やけどをしたことのある人

**使用中身体に異常を感じたときはすぐに使用を中止し、医師に相談してください。**  
健康を害するおそれがあります。

**使用しても効果が現れない場合は医師または専門家に相談してください。**  
事故や健康を害するおそれがあります。

### 充電池について



**本製品は充電式電池を内蔵しています。**

**火中投入、加熱、高温、低温下での充電、使用、放置をしないでください。**  
発熱、発火、破裂の原因になります。

## ご使用について



お子様に使用させないでください。(ただし、保護者、医師又は専門家の監督下で使用する場合は除く)

事故やけがの原因になります。

頭部や顔面には使用しないでください。

事故や体調不良の原因になります。

治療以外の用途に使用しないでください。

事故やけがの原因になります。

他の治療器と同時に使用しないでください。

健康を害するおそれがあります。

連続で長時間使用しないでください。

低温やけどの恐れがあります。

### 「低温やけど」について

比較的低い温度(40℃～60℃)であっても、長時間皮膚の同じ場所に触れていると、熱い、痛いといった自覚症状がない場合でもやけどします。長時間同じ場所に当て続けしないでください。

本体を水につけたり水洗いしないでください。

感電・ショート・発火・故障などの原因になります。

使用時には強く押しあてすぎないでください。

けがや破損の原因になります。

高温のところで使用しないでください。

発火や発熱、やけどの原因になります。



「55℃モード」でHOTボタンを押して長い時間使用すると、皮膚にやけどが生じることがあるため注意してください。

やけどしそうな激しい熱刺激を感じたらすぐに離してください。

- 肌に当ててからHOTボタンを握る場合に比べ、HOTボタンを握って温灸部が熱くなりきった状態で肌に当てる方が熱刺激を強く感じます。
- 衣類の上からご使用いただいた直後に、肌に直接押し当てると熱刺激が過敏に感じる場合があります。
- 冬場など身体が冷えた状態で使用する際も、熱刺激が過敏に感じる場合があります。
- 55℃モードで熱刺激が過敏に感じる場合は40℃モードでのご使用を推奨します。

故障が発見された場合は勝手に修理などせず、お買い上げの販売店または製造販売元に連絡してください。


ご使用前に必ず取扱説明書をお読みの上、正しくご使用ください。

商品は、定期的に点検してください。

事故やけがの原因になります。

# 安全上のご注意

## 電源について

 充電ケーブルを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしないでください。

ショート・故障の原因になります。

コードや電源プラグなどが傷んだり、コンセントの差込みがゆるいときは使用しないでください。

ショート・火災の原因になります。

 お手入れの際は必ずACアダプターをコンセントから抜いてください。また、ぬれた手で抜き差ししないでください。

けがの原因になります。

ACアダプターを抜くときは、コードを持たずにACアダプター本体を持って引き抜いてください。

ショート・発火の原因になります。

使用時以外はACアダプターをコンセントから抜いてください。

絶縁劣化による漏電・火災の原因になります。


ACアダプターは付属品の指定されたものを使用してください。

また、付属のACアダプターはほかの商品には使用しないでください。

**MODEL No.** 0015/1020 II

他のアダプターを使用すると故障の原因になります。

## 異常(故障)について

 故障を発見したときはすぐに使用を中止してください。事故やけがの原因になります。


## その他

 改造はしないでください。また、修理技術者以外の方は、絶対に分解したり修理をしないでください。(廃棄時を除く)

火災・感電・けがの原因になります。

## 注意

### ご使用について

 浴室など湿気の多い場所では使用しないでください。また、水などの液体がかからないようにしてください。

感電や故障の原因になります。

本体に強い衝撃をあたえないでください。

故障や事故の原因になります。

一人用です。複数の人が同時に使用しないでください。



使い始めは5分程度をめどに弱い刺激でご使用ください。

初めから刺激を強くすると、健康を害するおそれがあります。

1回の使用は15分以内とし、1日の使用は1日2回、30分以内にしてください。

長時間の連続使用は、必要以上の刺激となり逆効果やけがの原因になります。

同一箇所への連続使用は避けてください。

長時間の連続使用は、必要以上の刺激となり逆効果やけがの原因になります。

落下させたら使用を中止してください。

本商品はリチウムイオン充電電池を使用しています。落下の衝撃で充電電池にダメージが入り、発火・発煙・破裂など思わぬ事故につながる可能性があります。

### 保管について

 直射日光が長時間あたるところ、ストーブの近くなど、高温のところでは保管しないでください。

火災・故障の原因になります。

# 🔍 梱包内容と各部の名称


## 梱包内容の確認

開梱したら、ご使用になる前に以下のものが揃っているか確認してください

- 本体
- ACアダプター
- 充電ケーブル


## 各部の名称

### 本体

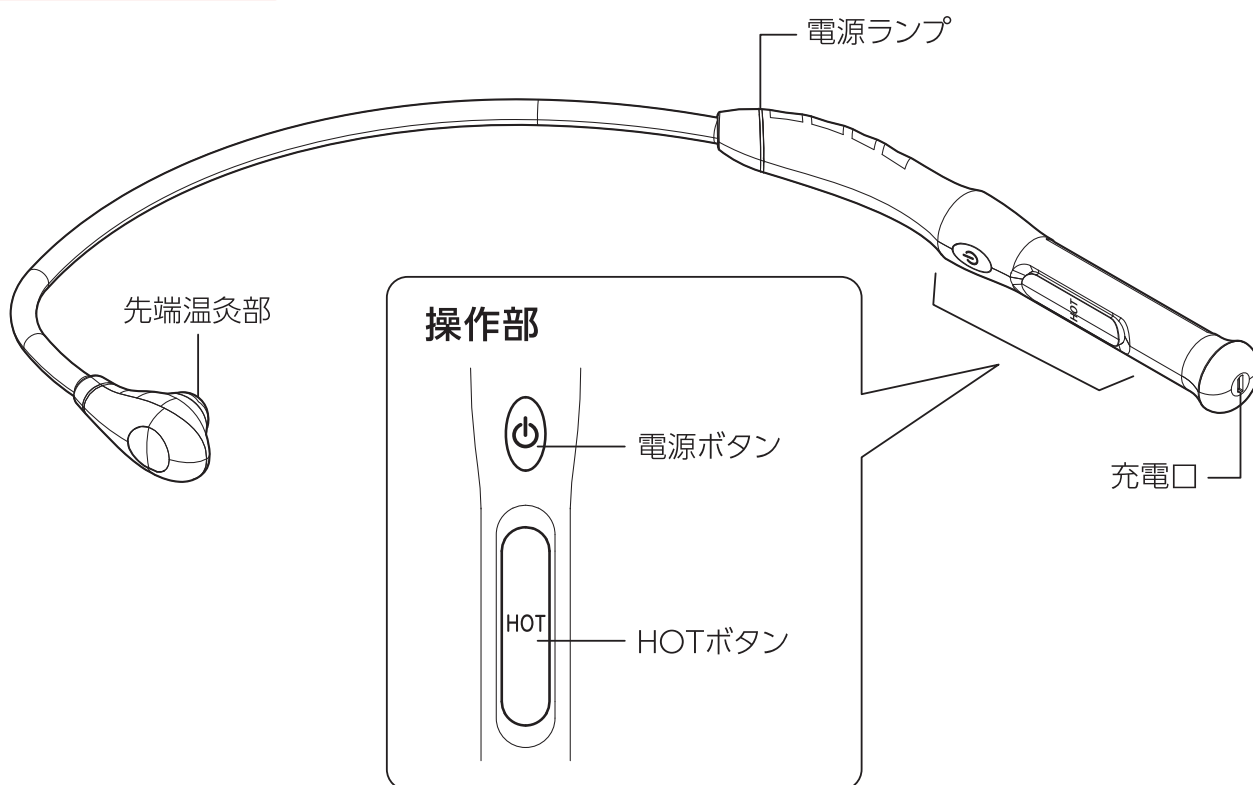


### 付属品

#### ACアダプター

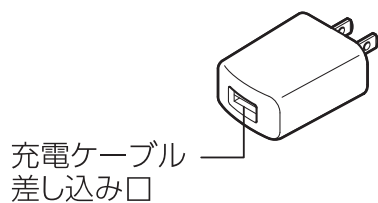

#### 充電ケーブル

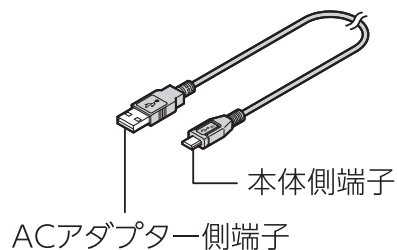

# 👤 使いかた


初めてご使用になる時、または長期間ご使用にならなかった時は、電池が放電し作動しないことがあります。充電してからお使いください。  
また、機器が正常に作動するか確認してください。

## ご使用前の準備

### 充電する

#### 1 電源と本体をつなぐ

- ① 充電ケーブルの本体側端子を本体に、
- ② ACアダプター側端子をACアダプターに差し込み、
- ③ ACアダプターをコンセントに差し込んで充電を開始します。

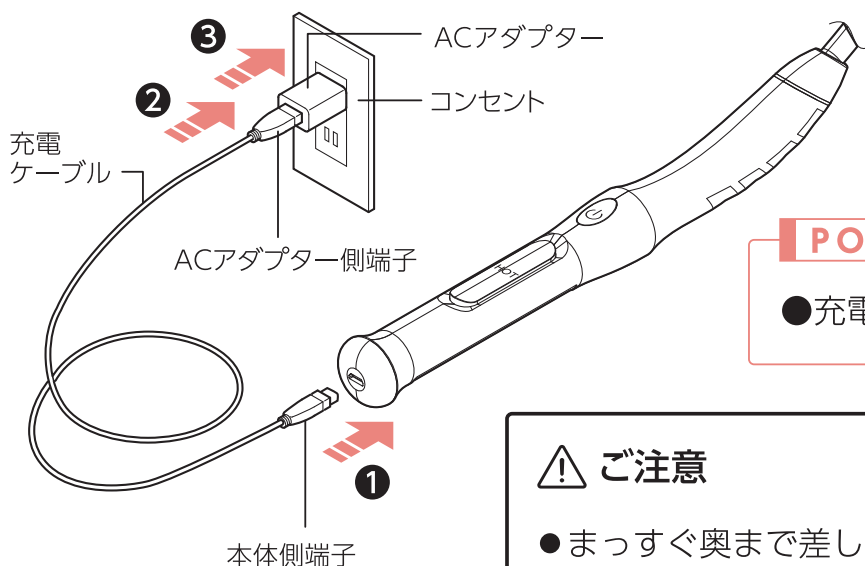

#### POINT

- 充電中は使用できません。


#### ⚠️ ご注意

- まっすぐ奥まで差し込んでください。
- モバイルバッテリーでの充電は行わないでください。故障の原因になります。

#### 2 充電の完了を確認します

#### POINT

- 充電中は、電源のランプが **赤色点灯** します。
- 充電が完了すると電源のランプが **橙色点灯** します。

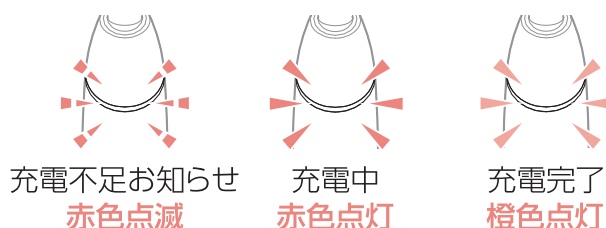


#### 3 充電ケーブルを本体から抜く

- ・ 約3時間の充電で約1.5時間使用可能です。
- ・ 充電にかかる時間は充電電池の残量や環境によって異なります。


## 操作のしかた

### 1 電源ボタン(🔌)を約2秒間長押しする


- ①電源ボタンを長押しすると「40℃モード」で動作を開始します。
- ②もう一度電源ボタンを押すと「55℃モード」に切り替わり、HOTボタンを握っている時だけ55℃まで上昇します。  
※HOTボタンを握っていない時は40℃モードで動作します。
- ③電源ボタンを押すたびに「40℃モード」と「55℃モード」が切り替わります。
- ④動作を終了する時は、電源ボタンを長押しして「停止」させてください。  
※動作を始めてから15分間でタイマーが動いて自動的に停止します。

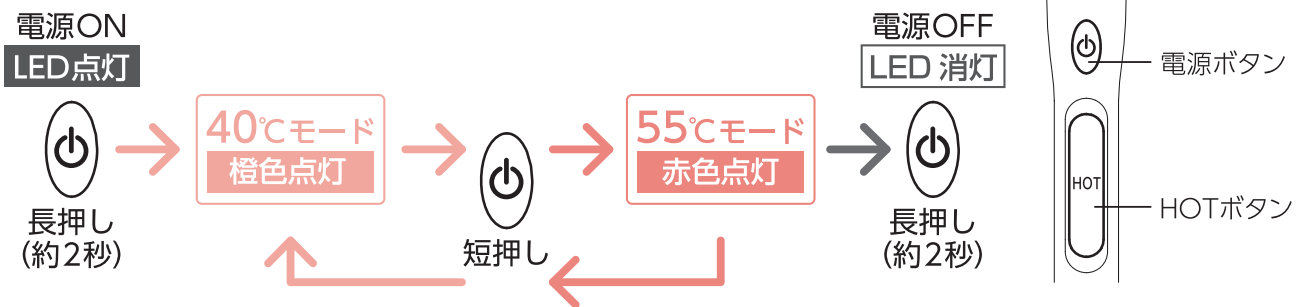

### 〔温度上昇イメージ〕

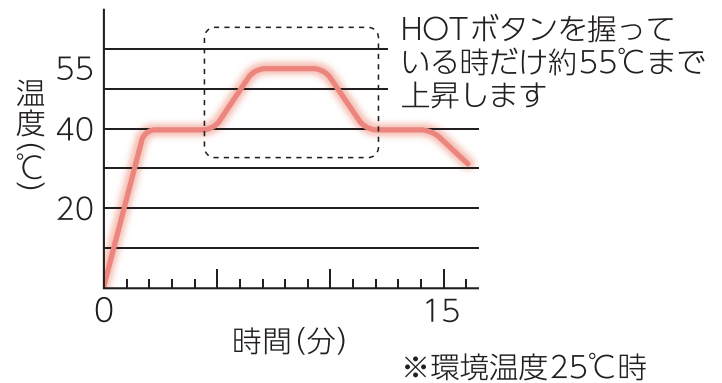


### 40℃モード 橙色点灯

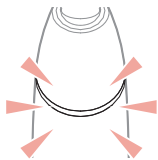


~~HOT~~  
※HOTボタンは操作できません。

### 55℃モード 赤色点灯

お好みに応じて温かさの使い分けが出来るモードとなっています。

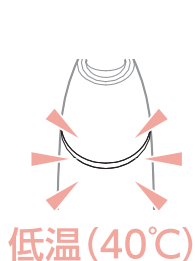

HOTボタンを握る  
→  
←  
離す

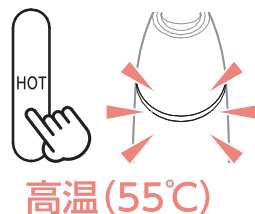


- HOTボタンを握っている時だけ、先端温灸部が約55℃まで上昇します。
- HOTボタンを握っていない時は約40℃で動作します。



## 2 先端温灸部を身体にあてて指圧する

先端温灸部を温めながら、身体の各部を指圧してください。

### 〔使用例〕

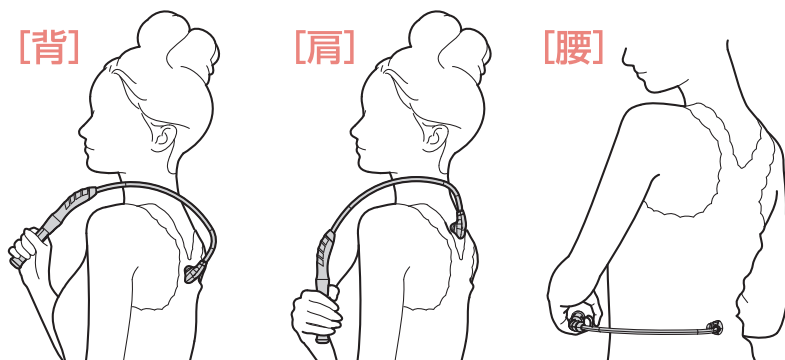

### ⚠ 警告

- やけどしそうな激しい熱刺激を感じたら離してください。

## 3 終了する

- 電源ONから約15分経過すると自動OFFタイマーが働き、自動的に停止します。
  - 途中で停止する場合は、電源ボタンを約2秒間長押ししてください。
- ※ 充電残量が少なくなると電源ランプが赤色点滅します。充電してください。



## お手入れ・保管について

- お手入れの際はUSBケーブルを本体から抜いてください。また、濡れた手で抜き差ししないでください。
- 本体の汚れは、固くしぼった布などで軽くふきとります。
  - お手入れする際は、必ずUSBケーブルを外してください。
  - 汚れが落ちない場合は中性洗剤を含ませた布などでふきとり、乾いた布でからぶきしてください。
  - アルコール・シンナー・ベンジンなどの溶剤は使用しないでください。故障や部品の割れ、変色などの原因になります。
- 中性洗剤を含ませた布をよく絞って拭いて、自然乾燥させてください。
- 保管の場合は、汚れやホコリを取ったあと、直射日光が長時間あたるところ、ストーブの近く、多湿のところは避けて保管してください。
- 幼児や子供の手の届くところには保管しないでください。
- コード類は、ねじれをほどいて保管してください。
- 先端温灸部の金属は、ご使用期間とともに変色(酸化)する場合がありますが問題ありません。

## 故障かなと思ったら

初めてご使用になる時、または長期間ご使用にならなかった時は、電池が放電し作動しないことがあります。充電してからお使いください。

温かにならない	充電電池の残量不足ではありませんか？ 充電電池の残量が少ないと温くなるまでに時間がかかります。 使用する環境温度により効果が感じられない場合があります。 連続で使用すると効果が感じられない場合があります。
使用中に停止する	充電電池の残量不足ではありませんか？ 約15分でタイマーが働き、自動停止し、ランプが消えます。 異常ではありません。
充電できない	ACアダプターを正しくつないでいますか？ (P.6参照)
	長期間保管し、電池が放電しきっていませんか？ 完全放電すると使用できませんので3ヶ月に1度は充電してください。  高温時や低温時は充電できないことがあります。 常温の場所で充電してください。

それでもなお異常が解決しない場合は、直ちに使用を中止し、事故防止のため必ず販売店に相談してください。

### 警告

- 改造はしないでください。また、修理技術者以外の方は、絶対に分解したり修理しないでください。

## 廃棄について

本製品はリチウムイオン充電電池を使用しています。  
本製品を廃棄される場合は、自治体の分別ルールに従って廃棄してください。

### 注意

- 充電残量がある場合は止まるまで何回か使用して電池を使い切ってください。

## 仕様

類別	機械機器80 はり又はきゅう用器具
医療機器分類	管理医療機器
一般的名称	温灸器 (JMDNコード 71018000)
販売名	モノルルド グリグリ温灸
商品番号	AX-HPL106
医療機器認証番号	303AKBZX00077000
電気定格	DC5V 1A
アダプター定格	入力：AC100V 50/60Hz 13VA 出力：DC5V 1A
使用電池	リチウムイオン充電電池
製品サイズ	本体：(約) W350×D32×H400 (mm)
製品重量	約350g
充電所要時間	約3時間
連続使用時間	約1.5時間
タイマー	約15分自動オフ
素材	本体：ABS樹脂、鋼(スチール)
ヒーター温度	40℃モード時：約40℃、55℃モード時：約55℃ ※環境温度25℃時
生産国	中国
製造業者	U Young Appliance Manufacturing(Xiamen) Co., Ltd (中国)
製造販売業者	株式会社 アテックス

# ♡ 保証とアフターサービス

- 1 本製品の保証書は、下記に添付しています。保証書は必ず「お買上げ年月日」と「販売店名」など、所定事項の記入および記載内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。
- 2 保証期間は、お買上げ日より1年です。保証期間中に修理を依頼される場合は保証書をご提出のうえ、お買上げの販売店に修理をご依頼ください。
- 3 保証期間経過後の修理につきましては、修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。
- 4 弊社は「モノルルド グリグリ温灸」の補修用性能部品の最低保有期間を、製造打切後最低3年間としています。性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。
- 5 保証期間中の修理などアフターサービスについてご不明な点は、お買上げの販売店、または下記に明記しておりますカスタマーサービス課までお問い合わせください。

## 保証書

本製品は厳密な検査を経て出荷されたものです。お客様の正常な使用状態で万一故障した場合は、保証書に記載された期間、下記保証規約により無料修理をお約束いたします。修理は必ず本書を添えてご依頼ください。



株式会社アテックス

〒547-0014 大阪市平野区長吉川辺3-3-24  
<https://www.atex-net.co.jp/>

品名 / 型番	モノルルド グリグリ温灸 / AX-HPL106		
お買上げ年月日*	年 月 日	保証期間	お買上げ日より1年 本体
* お客様	お名前 様		* 販売店
	ご住所 TEL: (        )        -		

★欄に記入のない場合、本書は無効となることがありますので、必ず記入の有無をご確認ください。

### 保証規約

- 1 保証期間中であっても以下の理由またはこれに準ずる理由により生じた故障などについては本保証書は適用されません。
  - ・取扱上の不注意、誤った使用方法
  - ・天災、火災などによる故障または損傷
  - ・お買上げ後の転居等による輸送、移動、落下など
  - ・保存上の不備
  - ・弊社または弊社の指定した事業所以外で行われた修理、改造
  - ・本製品本来の使用目的以外の使用
  - ・一般家庭以外（例えば業務用の長時間使用、船舶への搭載）に使用された場合の故障および損傷
- 2 運賃諸掛り費用は原則としてお客様にてご負担願います。
- 3 無料保証期間はご購入の日から1年です。
- 4 保証の適用されない故障および保証期間経過後の故障については、有料で修理いたします。
- 5 保証書の再発行はいたしません。
- 6 本書のご提示がない場合や無料保証期間を過ぎた場合は、有料修理になります。
- 7 本書は日本国内においてのみ有効です。

本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って本書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

 株式会社アテックス  
ATEX <https://www.atex-net.co.jp/>

株式会社アテックス 大阪物流センター  
〒595-0074 大阪府泉大津市小津島町6-11

■修理・アフターサービスについてのご相談・お問い合わせは



カスタマーサービス課

**0120-486-505**

受付時間 平日9:00~17:00(土・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く)

⚠️ ご使用上の注意


55°Cモードをご使用の際は以下の点にご注意願います。

- 肌に当ててから HOT ボタンを握る場合に比べ、HOT ボタンを握って温灸部が熱くなりきった状態で肌に当てる方が熱刺激を強く感じます。
- 衣類の上からご使用いただいた直後に、肌に直接押し当てると熱刺激が過敏に感じる場合があります。
- 冬場など身体が冷えた状態で使用する際も、熱刺激が過敏に感じる場合があります。
- 55°Cモードで熱刺激が過敏に感じる場合は 40°Cモードでのご使用を推奨します。



【衣類の上から】

熱刺激が過敏に感じ  
易い使い方ですので、  
ご注意ください。

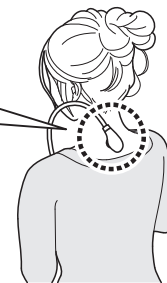

【肌に直接】

 ATEX